


マイティチェッカーの使用方法

溶けるまで 30 分以上かかるので事前に作っておきます

Step1 掃除機でゴミを採取します

ゴミ取り袋を掃除機にセットして、1m²の範囲を1分間吸引します

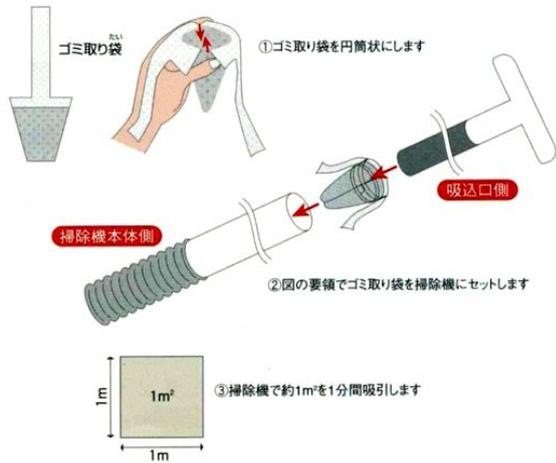


- 掃除機にごみ取り袋をセットします。方向を間違わないようにして下さい。
(袋を輪ゴムで止めるとはずれにくいです)
- 掃除機で約 1 m² を 1 分間吸引します。

Step3 アレルゲンを検出します

マイティチェッカーを取り出し、抽出液に浸します

- ①アルミラミネート袋を開封し、マイティチェッカーを取り出します(同封の乾燥剤は検査には使いません)
- ②マイティチェッカーを、抽出した液にDIPラインまで3秒間浸漬します

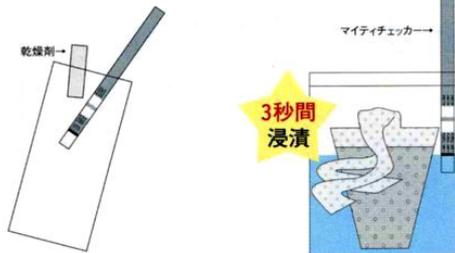


- ③マイティチェッカーをアルミラミネート袋等の上に水平に置き、そのまま10分間放置します



- マイティチェッカー (スティック) をアルミ袋から取り出します。抽出液に浸す直前に取り出して下さい。
折り曲げたり、浸す部分を手で触ったりしないで下さい。
- 抽出液にスティックを差し入れ、DIP ラインまで 3 秒間浸漬します。
- 取り出したスティックをアルミ袋の上に水平に置きます。
- 10 分後に判定して下さい。

Step2 アレルゲンを抽出します


抽出液を作ってゴミ取り袋を浸し、アレルゲンを抽出します

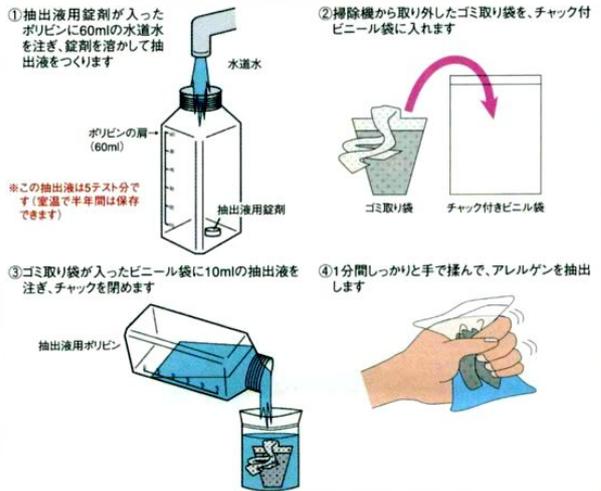

- 抽出液を用意します。
- 錠剤が容器に入っている事を確認し、水道水を容器の肩 (60ml) まで入れます。
- 掃除機からごみ取り袋を取り出し、下半分 (ごみの入った方) を切り取ります。
- チャックつきビニール袋に抽出液を 10 ml 入れ、切り取った下半分のごみ取り袋を入れます。
- チャックを閉めて約 1 分間手で良く揉んで下さい。

Step4 レベルを判定します

ダニアレルゲンレベルの判定を行います 必ず10分後の発色にて判定してください。

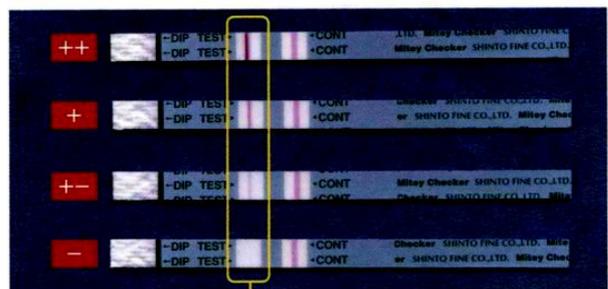

マイティチェッカーの判定基準

判定	判定の目安	ダニアレルゲンレベル
++	ラインが太く濃い	>35μg (>350匹)/㎡
+	ラインが明確	10μg (100匹)/㎡
+-	うっすらと発色	5μg (50匹)/㎡
-	発色しない	<1μg (<10匹)/㎡

文部科学省の判定基準は「ダニ数は100匹/m²以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること」となっています。マイティチェッカーの「+」以下なら基準内であることがわかります。